

Pflegeanleitung und Gebrauchshinweise
Epithese im Defekt verankert „defektgetragene Epithese“
(Sonderanfertigung/ Medizinprodukt)

Sie wurden mit einer Epithese versorgt, die individuell auf Ihren Defekt abgestimmt und über dem Defekt befestigt ist. Folgende Hinweise sollen Ihnen den Umgang mit Ihrer Epithese erleichtern.

Die Epithese täglich abends abnehmen und mit transparentem, weißen Spülmittel reinigen (löst Fette und ist lebensmittelecht).

- **Defektreinigung**

Kontrollieren Sie regelmäßig das Defektgebiet auf Druckstellen und beobachten Sie die umliegenden Hautpartien. Reinigen Sie diese mit Wasser und neutraler Seife. Bei offenen Defekten beachten Sie bitte die Anweisungen Ihres Arztes. Starke Verkrustungen weichen Sie vorher mit autosteriler Kochsalzlösung ein (erhältlich in der Apotheke). Zur Pflege empfehlen wir Bepanthen Augen- und Nasensalbe.

- **Epithesenreinigung**

Grundsätzlich sollte die Reinigung von **der Mitte der Epithese zum Rand hin** erfolgen. Dabei bitte **keine aggressiven Lösungsmittel verwenden** (z.B. Wundbenzin/Nagellackentferner o.ä.).

Legen Sie die Epithese max. 10 min in handwarmes Wasser, dem Sie eine geringe Menge eines klaren, farblosen Spülmittels zufügen sollten (löst Fette und ist lebensmittelecht). Danach spülen Sie die Prothese ab und tupfen diese vorsichtig trocken. Ablagerungen auf der Defekt zugewandten Seite entfernen Sie vorsichtig mit einer Bürste. **Die Vorderseite nicht bürsten, bitte nur abwaschen!**

- **Einsetzen der Epithese**

Die Ränder der Epithese werden dünn mit Vaseline bestrichen und nach dem Auftragen vorsichtig angedrückt (nicht streichen). So erreichen Sie einen nahezu unsichtbaren Übergang und einen besseren Halt.