

**Pflegeanleitung und Gebrauchshinweise
Epithese mit Implantaten
(Sonderanfertigung/ Medizinprodukt)**

Sie wurden mit einer Epithese versorgt, die individuell auf den Defekt abgestimmt und mittels Implantaten/ Magneten befestigt ist.

Folgende Hinweise sollen Ihnen den Umgang mit Ihrer neuen Epithese erleichtern.

Die Epithese täglich abends abnehmen und mit transparentem, weißen Spülmittel reinigen (löst Fette und ist lebensmittelecht).

- **Defektreinigung**

Für alle Implantate gilt, dass diese an den Hautaustrittsstellen 1x täglich mit einem mit Octenilin/ Octenisept getränkten Wattestäbchen gereinigt werden muss.

Zur Pflege der Hautmanschette kann Bepanthen Augen- und Nasensalbe auf die Haut und um die Implantat-Pfeiler aufgetragen werden. Umliegende Hauptpartien reinigen Sie mit Wasser und neutraler Seife. Bei einem offenen Defekt beachten Sie bitte die Anweisungen Ihres behandelnden Arztes.

Bei starker Rötung, Schwellung oder bei Schmerzen um die Implantate bitte zeitnah Ihren behandelnden Facharzt aufsuchen.

- **Epithesenreinigung**

Grundsätzlich sollte die Reinigung **von der Mitte der Epithese zum Rand hin** erfolgen. Die Epithese mit Wasser befeuchten, 2-3 Tropfen Spülmittel auf die Epithese geben und mit einer weichen Bürste die Innenseite der Epithese reinigen. **Die Vorderseite bitte nur abwaschen, nicht bürsten!** Danach die Epithese unter fließendem Wasser gut abspülen und vorsichtig trocken tupfen.

- **Einsetzen der Epithese**

Die Ränder der Epithese werden dünn mit Vaseline bestrichen und nach dem Anbringen vorsichtig angedrückt. So erreichen Sie einen nahezu unsichtbaren Übergang zur Haut und eine bessere Adaption.